

RED-I®

VAD ÄR RED-I OCH VAD ANVÄNDS DEN FÖR?

Red-I används för att behandla och förebygga röda och irriterade ögon. Red-I är fri från konserveringsmedel och kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Red-I är en steril vätskelösning för ögonen med 0,2 % hyaluronsyra och 4Eyes™ extrakt av örter. Hyaluronsyra återfinns naturligt i ögats tårfilm och har smörjande, fuktande och skyddande egenskaper. Örterna i 4Eyes™ extraktet har anti-inflammatoriska och lindrande egenskaper.

NÄR KAN RED-I ANVÄNDAS?

Red-I kan användas när ögonen blivit röda och irriterade, till exempel när de utsatts för yttre påverkan av vind, sol, torr luft, saltvatten, rök eller vid långvarig ansträngning till exempel vid bildskärm.

VEM KAN ANVÄNDA RED-I?

Red-I kan användas av vuxna. Kan användas tillsammans med kontaktlinser.

HUR ANVÄNDER MAN RED-I?

Applicera 1 droppe i det påverkade ögat, 2–3 gånger dagligen efter behov.

- Öppna flaskan genom att fatta tag i den utstickande plastbiten på lockets bas och dra bort förslutningsringen. Ta därefter av flaskans topp.
- Luta huvudet lätt bakåt och håll flaskans öppning nära ögat.
- Tryck lätt på flaskan med tummen och pekfingeret, så att en droppe faller i ögat.
- Sätt tillbaka flaskans topp efter användning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

- Använd inte om flaskan är skadad
- Sätt alltid tillbaka flaskans topp efter användning
- Använd inte om du är överkänslig mot något av innehållsämnen
- Vidrör inte ögat med flaskan
- Använd inte i närvaro av kvartära ammoniumföreningar (-ammoniumklorider, till exempel i hårbalsam)
- Applicera inte andra läkemedel och liknande produkter för utvärtes bruk på ögonen inom 15 minuter efter applicering av Red-I
- Efter applikation kan, i sällsynta fall, synen tillfälligt bli suddig på grund av lösningens viskositet ("tjockhet"). Vänta därför några sekunder innan du påbörjar aktivitet som kräver klar syn.
- Använd inom 2 månader efter flaskans öppnande.
- Endast för utvärtes bruk. Sväljes ej.
- Endast för användning i ögat.

PRODUKTINFORMATION

Red-I är en medicinteknisk produkt, CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet 93/42/EEC.

En flaska innehåller 10 ml, vilket motsvarar drygt 250 droppar. Den patenterade kläm-flaskan OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) medger att innehållet förblir sterilt utan konserveringsmedel.

INNEHÅLL

Anthemis Nobilis distilled water, Hamamelis Virginiana distilled water, Vaccinium Myrtillus distilled water, Centella Asiatica distilled water, Sodium hyaluronate, Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium chloride, Sodium edetate, Aqua ad iniectionem

FÖRVARING

Förvaras i rumstemperatur och utom räckhåll för barn. Förpackningen sorteras som brännbart avfall.



STERILE A

DISTRIBUTÖR

Trimb AB, Götgatan 9, SE-116 46 Stockholm, Sweden

PRODUCENT

NTC s.r.l., Via Luigi Ranza 3, IT-20124 Milan, Italy

BP-SN-2, rev 2014-05

RED-I®

HVA ER RED-I OG HVA BRUKES DET TIL?

Red-I brukes til å behandle og forebygge røde og irriterte øyne. Red-I er uten konserveringsmidler og kan også brukes sammen med kontaktlinser.

Red-I er en steril væskeløsning for øyne med 0,2% hyaluronsyre og 4Eyes™ ekstrakt av urter. Hyaluronsyre finnes naturlig i øyets væske og har smørende, fuktende og beskyttende egenskaper. Urtene i 4Eyes™ ekstrakten har anti-inflammatoriske og lindrende egenskaper.

NÅR KAN MAN BRUKE RED-I?

Red-I kan brukes når øyne er røde og irriterte, for eksempel hvis de har vært utsatt for ytre påvirkning som vind, sol, tørr luft, saltvann, røyk eller ved langvarige anstrengelser som for eksempel foran skjermer.

HVEM KAN BRUKE RED-I?

Red-I kan brukes av voksne. Kan brukes sammen med kontaktlinser.

HVORDAN BRUKER MAN RED-I?

Drypp 1 dråpe i det påvirkede øyet 2–3 ganger daglig etter behov.

- Åpne flasken ved å ta tak i den utstikkende plasttappen i korken og dra av forseglingsringen. Ta deretter av toppen på flasken.
- Len hodet lett bakover og hold flaskens åpning nærme øyet.
- Trykk lett på flasken med tommel og pekefinger slik at en dråpe drypper ned i øyet.
- Sett på flaskens topp igjen etter bruk.

FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER

- Bruk ikke en flaske som er skadet
- Sett alltid på flaskens topp igjen etter bruk
- Bruk ikke preparatet om du er overfølsom overfor noen av innholdsstoffene
- Berør ikke øyne med flasken
- Bruk ikke preparatet i nærheten av kvartære ammoniumforbindelser (-ammoniumklorider, for eksempel i hårbalsam)
- Bruk ikke andre legemidler og lignende produkter til utvortes bruk på øyne i løpet av de neste 15 minuttene etter drypping med Red-I
- Etter drypping kan i noen tilfeller synet bli forbigående tåkete på grunn av løsningens viskositet (tykkelse). Vent derfor i noen sekunder før du påbegynner aktiviteter som krever klart syn.
- Åpnet flaske må brukes innen 2 måneder
- Kun til utvortes bruk. Må ikke svelges
- Kun til bruk i øyne

PRODUKTINFORMASJON

Red-I er et medisinsk produkt som er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr.


En flaske inneholder 10 ml, som tilsvarer drøyt 250 dråper. Den patenterte klemflasken OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) sørger for at innholdet forblir sterilt uten konserveringsmidler.

INNHOOLD

Anthemis Nobilis distilled water, Hamamelis Virginiana distilled water, Vaccinium Myrtillus distilled water, Centella Asiatica distilled water, Sodium hyaluronate, Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium chloride, Sodium edetate, Aqua ad iniectionabilia

OPPBEVARING

Oppbevares i romtemperatur og utilgjengelig for barn.
Emballasjen sorteres som brennbart avfall.

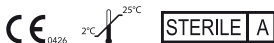

DISTRIBUTØR

Trimb AB, Götgatan 9, SE-116 46 Stockholm, Sweden

PRODUSERT AV

NTC s.r.l., Via Luigi Razza 3, IT-20124 Milan, Italy

BP-SN-2, rev 2014-05